

rombica

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Rombica Wellness Amadea ID: MSG-005

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов фактивная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не сушите и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.


Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для глаз. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: "Венчжоу Хуифан Электрик Эпплайенсес Ко. Лтд." No. 192, Сяодань Роад, Ванцюань Таун, Пинъян Дистрикт, Венчжоу Сити, Чжацзан Провинс, КНР [Китайская Народная Республика], Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 11250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Корпус устройства
- Складающаяся конструкция
- Застежка для регулировки длины ремня для головы
- Панель управления
- Кнопка питания (Вкл./Выкл./Регулировка режимов Долгое нажатие – включение/выключение устройства Короткое нажатие – переключение режимов
- Индикатор заряда батареи
- Индикатор воспроизведения музыки
- Индикатор воздушно-компрессионного массажа
- Индикатор согревающего массажа
- Индикатор вибрации

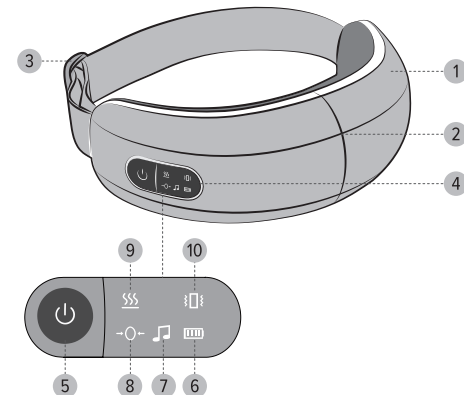

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 5 Вт
Питание: от встроенного аккумулятора
Вход: DC 5В/1А
Рабочая температура: до 42°С
Емкость встроенного аккумулятора: 1200 мАч / 3.7В
Количество режимов: 4
Материал: пластик, полиуретер
Комплектация: устройство, документация, USB-кабель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и держите кнопку питания (5), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания (5), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят выключение.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Устройство обладает четырьмя различными режимами работы: Energy, Relax, Relieve и Sleep.

Режим	Воздушно-компрессионный массаж	Согревающий массаж	Вибрация	Прогривание музыки	Таймер
Режим «Energy»	+	+		+	10
Режим «Relax»	+	+		+	15
Режим «Relieve»	+	+			15
Режим «Sleep»	+			+	20

Для последовательного переключения режимов работы коротко нажимайте на кнопку питания/переключения режимов (5). Звуковой сигнал подтвердит переключение режима работы.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите USB-кабель к Type-C разъему. Затем подсоедините USB-кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор будет издавать пульсирующий свет. Когда LED-индикатор будет издавать бесперывный свет – зарядка окончена.

- Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите места контакта на коже влажным полотенцем.
- Устройство разработано для массажа в области глаз. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы испытываете инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование
- Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь;
 - у вас плохое физическое состояние;
 - вы перенесли операцию на глазах;
 - если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
- Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим уверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией на эксплуатацию на русском языке. Изделие осмотро и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижележащими условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца