


Титановое основание гибридного типа

TS Link универсальный абатмент

Совместимость компонентов с имплантатами системы TS и Hiossen

- Стабильность крепления улучшена на 150% в сравнении с другими абатментами

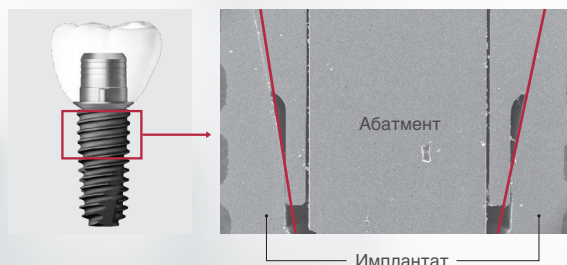

Широкий размерный ряд для разных клинических случаев

- Выбор абатмента по высоте десны 1 или 2 мм, в зависимости от глубины установки имплантата



- Выбор абатмента по высоте рабочей части 3мм или 5мм. Более надежное крепление протеза.



Официальная библиотека для Osstem (3shape / ExoCAD)

- Улучшена совместимость Ti-Zr

(Оригинальная библиотека сводит к минимуму погрешности линейных размеров циркониевого абатмента во время процесса фрезеровки)

- Три возможных размера цементного зазора между циркониевой частью и титановым основанием

(Можно выбрать подходящий размер в зависимости от CAD/CAM оборудования)

Типы фиксации коронки:

- Винтовая фиксация
- Цементная фиксация



Протокол работы



Снятие оттиска




Изготовление рабочей модели




Присоединить Титановое основание TS Link к лабораторному аналогу



Присоединить Сканбоди к титановому основанию TS Link

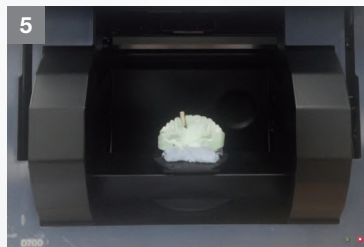

Сканирование рабочей модели

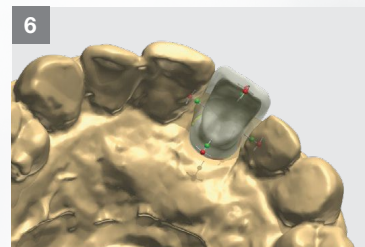

Дизайн и изготовление абатмента из циркония



Фиксация протеза

Официально доступные библиотеки для OSSTEM

3shape  exocad

OSSTEM[®]
IMPLANT